
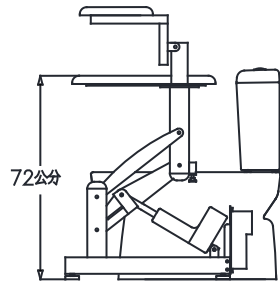



HCG HE7202 電動升降馬桶椅 使用說明

Electric Lift Commode Chair Manual

產品規格

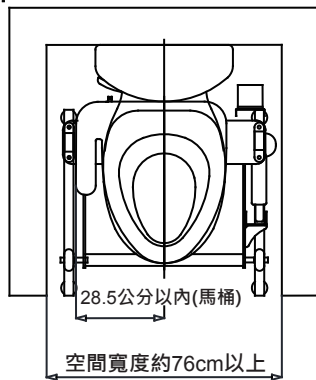

升降最高高度 72公分

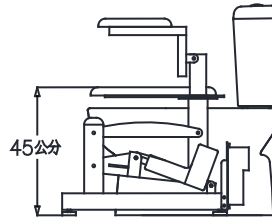


升降最低高度 45公分

產品規格

尺寸: 68(前後長)x70(左右寬)
適合馬桶寬度42公分以內。
座墊高度: 45~72公分
重量: 27公斤 (kg)
使用荷重: 100 公斤(kg) 以下
使用電源: 110V/220V (單向)
材質: 不鏽鋼.鋼鐵主體.防鏽
電著及粉末烤漆。
顏色: 灰白

確認配件

請檢查包裝盒內所有零件配件及數量

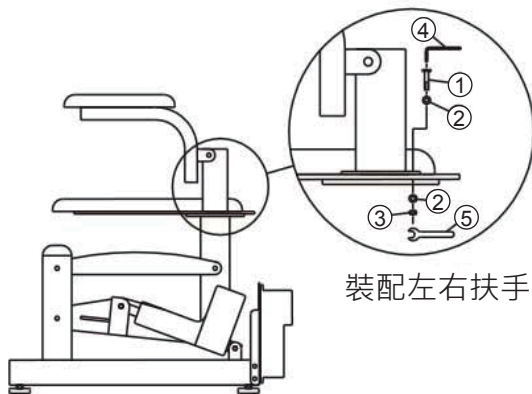

裝配左右扶手

調整4只腳墊高低並確認是否皆貼地不晃動

零件包1組

①		M8x25螺絲	4支
②		φ 8平墊圈	8個
③		M8螺母	4個
④		5mm 六角扳手	1支
⑤		13mm 開口扳手	1支

如何操作



- 壓△按鈕馬桶椅上升，壓▽按鈕馬桶椅下降，不壓放開按鈕則立即停止。
- 壓△按鈕馬桶椅上升到最高位置時會自動停止，壓▽按鈕馬桶椅下降到最低位置時會自動停止。
- 請先將馬桶椅上升至適度的高度後再坐下，再降到最低位置如廁完畢後再上升到能自行站的位置。

注意事項

- 1.使用升降馬桶椅時請勿將手放置座墊下方,防止下降時壓夾到手指。
- 2.請勿在屋外、露天使用,在室內要遠離浴缸..等有水或濕氣重的地方。
- 3.請勿使用酸性或鹼性的清潔液清洗本產品,也勿使用粗糙清潔布或刷子擦拭。
- 4.注意電線是否有破損的情形,長時間不用請拔除插頭電源。
- 5.請勿自行修理或改造本產品並注意是否零配件有鬆脫的情形。
- 6.請勿讓孩童操作本產品以免發生危險。
- 7.長輩使用須有看護人員在旁協助。
- 8.馬桶寬度須在42公分以內。

服務中心

維修中心	地址	電話
大台北維修中心	台北市中山區南京東路三段14巷9號5樓	0800-087089
零組件供應中心	台北市中山區龍江路76巷16號1樓	02-25068101
桃園維修中心	桃園市萬壽路三段121號2樓	0800-087089
竹苗維修中心	新竹縣湖口鄉中山路一段2號	0800-087089
大台中維修中心	台中市西屯區台灣大道四段16巷312號	0800-087089
彰投維修中心	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	0800-087089
雲嘉維修中心	嘉義縣水上鄉粗溪136-20號	0800-087089
大台南維修中心	台南市南區新樂路24號	0800-087089
高屏維修中心	高雄市新興區中正三路129號10樓	0800-087089
宜花東維修中心	花蓮市國聯四路80號1樓	0800-087089
金門維修中心	金門縣金寧鄉榜林村6-6號	08-2324334



和成欣業股份有限公司
台北市內湖區行善路398號1樓 (02)27925511