




型號
HF8750
HF8750E

馬桶輔助扶手 安裝使用說明書

注意事項


- 請務必閱讀本說明書後再進行組裝
- 謹慎保存此說明書

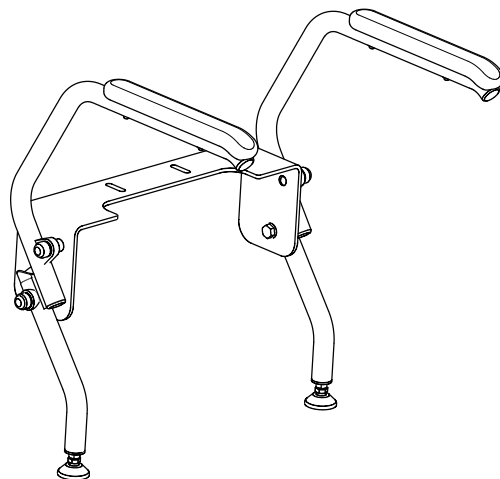

說明

- 誠心地感謝您購買本產品。
- 請務必閱讀此說明書後再進行組裝。
- 請確認零件表後再開始依下圖進行組裝。
- 榻榻米或者地板等容易被刮傷的地面上請務必鋪上鋪墊再進行組裝。
- 請注意周圍環境，組裝時請勿傷到其他傢俱。
- 為了安全，請務必在空曠的場所，且2人以上組裝。
- 組裝時請務必戴手套進行組裝，以確保安全。
- 在組裝時，請注意手指不要被夾到。
- 耐荷重：150KG以下

產品零件表

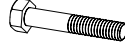a. 塑膠套筒	b. 塑膠墊片(白)	c. 六角螺帽	d. 螺帽飾蓋	e. 六角螺絲	f. 金屬墊片(小)
					
x4	x2	x4	x4	x2	x4
g. 圓管固定件	h. 金屬墊片(大)	i. 螺絲	j. 長方型墊片	k. 錨栓	
					
x4	x2	x2	x2	x2	

日常清潔與保養


清潔保養時，請勿使用具有腐蝕性之清潔劑清洗，避免以菜瓜布或去汙粉刷洗，以免破壞產品表面，影響使用年限。

服務中心地址及電話

服務中心	地址	電話
北基維修中心	台北市中山區南京東路三段14巷9號5樓	0800-087-089
零件組供應中心	台北市中山區龍江路76巷16號1樓	02-25058101
桃園維修中心	桃園市萬壽路三段121號2樓	0800-087089
竹苗維修中心	新竹縣湖口鄉中山路一段2號	0800-087089
大台中維修中心	台中市西屯區台灣大道四段16巷312號	0800-087089
彰投維修中心	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	0800-087089
雲嘉維修中心	嘉義縣水上鄉粗溪街136-20號	0800-087089
大台南維修中心	台南市南區新樂路24號	0800-087089
高屏維修中心	高雄市新興區中正三路129號10樓	0800-087089
宜花東維修中心	花蓮市國聯四路80號1樓	0800-087089
金門維修中心	金門縣金寧鄉榜林村6-6號	08-2324334


產品組裝步驟順序圖

步驟(1)：依圖示組裝產品零件

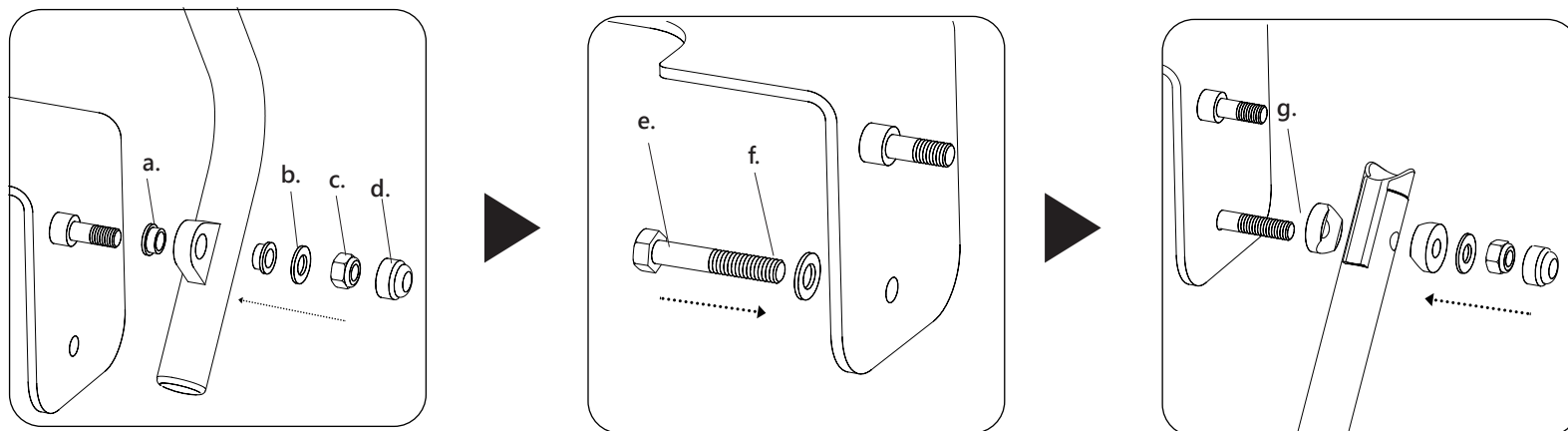


產品組裝步驟順序圖


步驟 (2) : 於馬桶上固定錨栓

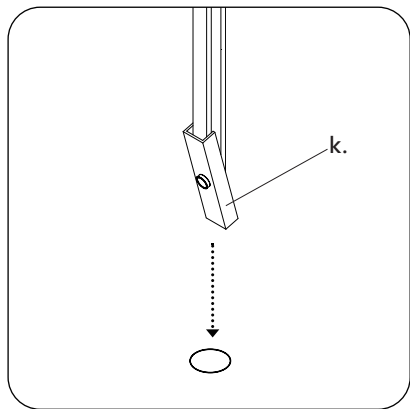


將錨栓置入馬桶孔洞內並倒拉使洞內的金屬部件勾在洞口內

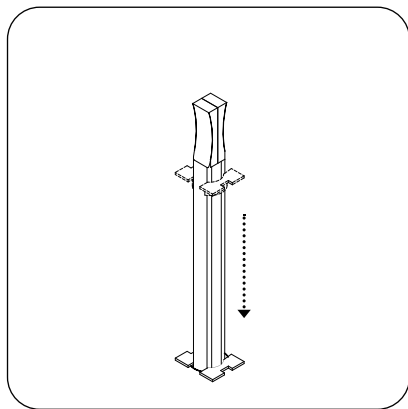

將錨栓上端之方型塑膠支撐片向下推至洞孔處

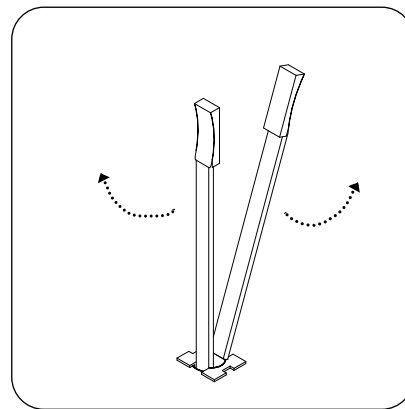


分離錨栓兩側把手並將其折斷

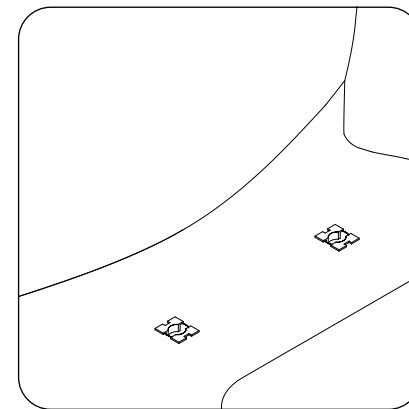


重複上述動作安裝第二個馬桶孔洞

步驟 (3) : 鎖固產品並完成組裝

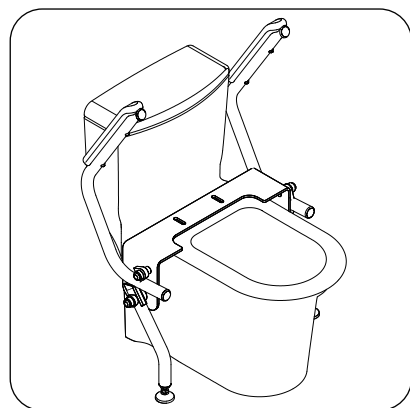


將產品放置於馬桶上並對齊孔洞以利後續方便鎖固

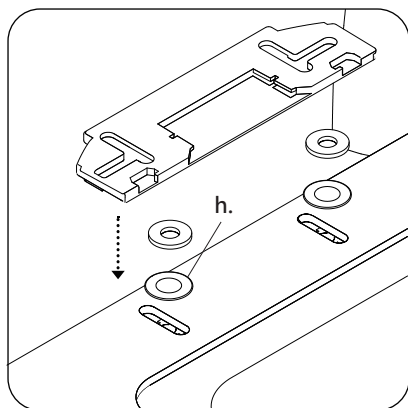


在產品上依圖示依序放上金屬墊片(大)、防滑墊、免治固定板

註:防滑墊與免治固定板為免治馬桶原有零件

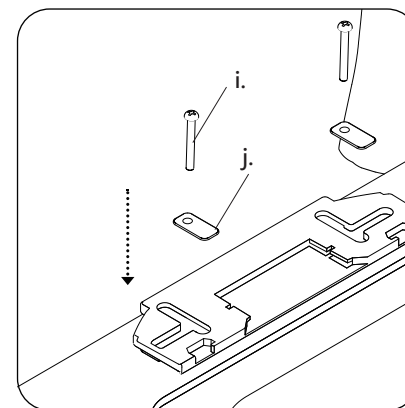

將長條型金屬墊片放入免治固定板溝槽內並鎖上螺絲

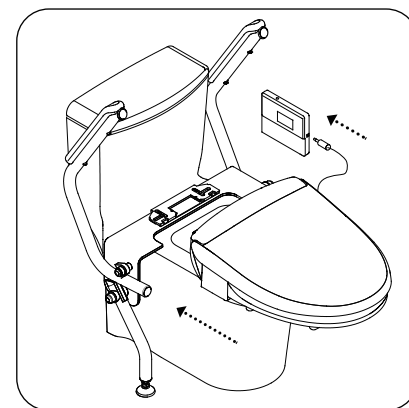

裝上免治馬桶
連接操控線(HF8750E)