

HCG

型號
SC4888

淋浴椅 安裝使用說明書

注意事項

- 安裝及使用前請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶。

服務中心地址及電話

服務中心	地址	電話
大台北維修中心	台北市中山區南京東路三段14巷9號5樓	0800-087089
零組件供應中心	台北市中山區龍江路76巷16號1樓	02-25068101
桃園維修中心 零組件	桃園市萬壽路三段121號2樓	0800-087089
竹苗維修中心 零組件	新竹縣湖口鄉中山路一段2號	0800-087089
大台中維修中心 零組件	台中市西屯區台灣大道四段16巷312號	0800-087089
彰投維修中心 零組件	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	0800-087089
雲嘉維修中心 零組件	嘉義縣水上鄉粗溪136-20號	0800-087089
大台南維修中心 零組件	台南市南區新樂路24號	0800-087089
高屏維修中心 零組件	高雄市新興區中正三路129號10樓	0800-087089
宜花東維修中心 零組件	花蓮市國聯四路80號1樓	0800-087089
金門維修中心 零組件	金門縣金寧鄉榜林村6-6號	08-2324334

2022.11

4888-90

產品說明

此款為鋁合金淋浴椅，坐板和靠背採用環保PE材料，鋁合金主架輕便、耐用、不易生鏽，腳管可調整高度，腳墊有防滑效果。坐板下的轉盤結構，可以360度旋轉。腳管、靠背和扶手無需工具就可以快速方便拆裝。本產品耐荷重：120KG以下。

組裝注意事項

- ① 請注意周圍環境，組裝時請勿傷到其他家具。
- ② 為了安全，請務必在空曠的場所，且2人以上組裝。
- ③ 組裝時，請注意手指不要被夾到。

日常清潔與保養

- ① 使用前請檢查洗澡椅是否有損壞或變形，定期檢查螺絲是否鬆動。
- ② 清潔保養時，請勿使用具有腐蝕性之清潔產品，避免以菜瓜布或去汙粉刷洗，以免破壞產品表面，使用後，即時用乾布將水漬擦乾，放置於乾燥通風環境中。

產品組裝步驟順序圖

步驟 (1)



1. 打開箱子，取出所有配件。

步驟 (2)



2. 安裝腳管，取腳管，按下彈珠，並插入到主架管內，彈珠要彈出主架管孔外。

步驟 (3)



3. 將4根腳管都安裝好。

步驟 (4)



4. 安裝扶手，取扶手，按下兩邊的彈珠，並插入到主架管內，彈珠要彈出主架管孔外。

步驟 (5)



5. 安裝靠背，取靠背，按下兩邊管上的彈珠，並插入到主架管內，彈珠要彈出主架管孔外。

步驟 (6)



需要旋轉時，
先將此拉銷手柄
往外拉才可以旋轉

6. 調節腳管高度到合適身高位置，讓彈珠從對應孔彈出，並能聽到“咔嚓”聲，四根腳管的孔位要調到同一對應位置，安裝完成。

產品零件圖

