




型號 HE8118

馬桶用扶手 安裝使用說明書

注意事項

- 安裝及使用前請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶。

W630mm x H905mm x D600mm

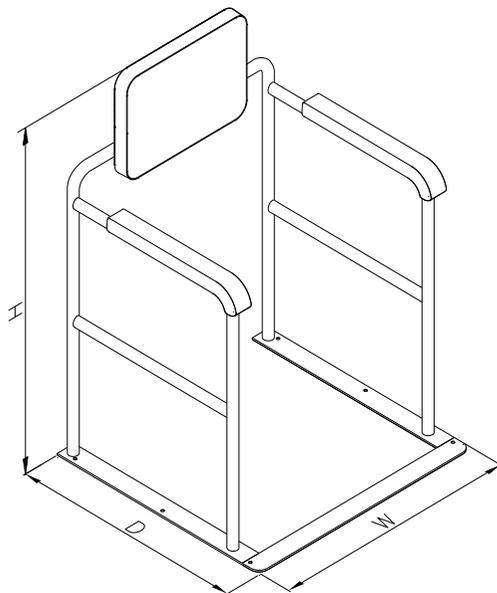


產品零件表

馬桶用扶手x1

膨脹螺釘x6

螺絲x6

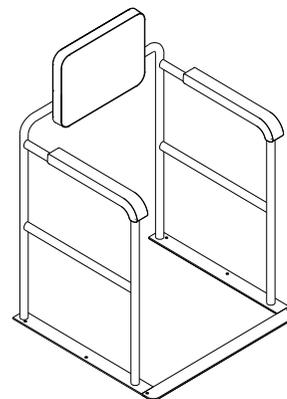


服務中心地址及電話

服務中心	地址	電話
北基維修中心	台北市中山區南京東路三段14巷9號5樓	0800-087089
零組件供應中心	台北市中山區龍江路76巷16號1樓	02-25068101
桃園維修中心 零組件	桃園市萬壽路三段121號	0800-087089
竹苗維修中心 零組件	新竹縣湖口鄉中山路一段2號	0800-087090
大台中維修中心 零組件	台中市西屯區中港路三段38-3號3樓	0800-087091
彰投維修中心 零組件	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	0800-087092
雲嘉維修中心 零組件	嘉義縣水上鄉祖溪136-20號	0800-087093
大台南維修中心 零組件	台南市南區新樂路24號	0800-087094
高屏維修中心 零組件	高雄市新興區中正三路129號10樓	0800-087095
直花東維修中心 零組件	花蓮市國聯四路80號1樓	0800-087096
金門維修中心 零組件	金門縣金寧鄉榜林村6-6號	08-2324334

安裝說明

- 1.請將馬桶用扶手置於適當位置。
- 2.以安裝工具於地面引出螺絲安裝孔(鑽孔直徑65mm，深度32mm)
- 3.先將膨脹螺釘置入螺絲安裝孔,且確認與地面為平整狀。
- 4.將螺絲由上方鎖入,確實與膨脹螺釘緊密結合。

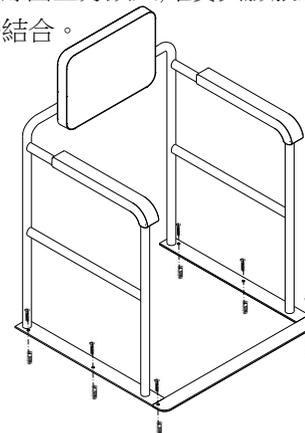

日常清潔、保養

清潔保養時，請勿用具有腐蝕性之清潔劑清洗，避免以菜瓜布或去汙粉刷洗，以免破壞產品表面；以清水及海棉或軟質之抹布並將水漬擦拭乾淨。