



型號
SC4882

浴缸用座板 安裝使用說明書

注意事項

- 請務必閱讀本說明書後再進行組裝。
- 僅慎保存此說明書。

說明


- 誠心地感謝您購買本產品。
- 請務必閱讀此說明書後再進行組裝。
- 請確認零件表後在開始依下圖進行組裝。
- 塌塌米或者地板等容易被刮傷的地面上請務必鋪上鋪墊再進行組裝。
- 請注意周圍環境，組裝時請勿傷到其他傢俱。
- 為了安全，請務必在空曠的場所，且2人以上組裝。
- 組裝時請務必戴手套進行組裝，以確保安全。
- 在組裝時，請注意手指不要被夾到。
- 耐荷重：120KG以下。

日常清潔與保養

清潔保養時，請勿使用具有腐蝕性之清潔清洗，避免以菜瓜布或去汙粉刷洗，以免破壞產品表面，影響使用年限。

產品組裝步驟順序圖

產品零件表

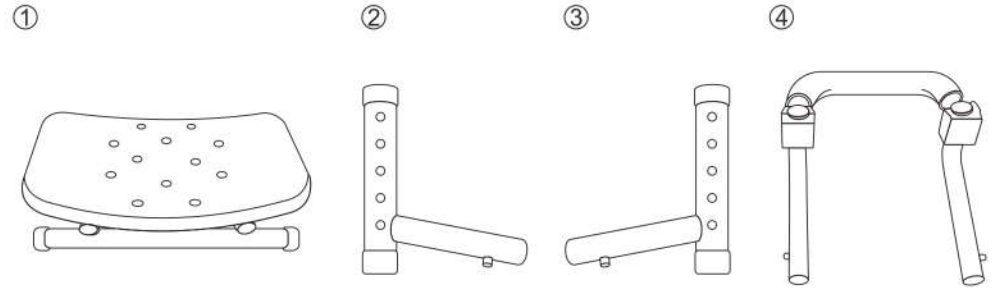

椅坐x1

左椅腳x2


右椅腳x2

扶手x2

服務中心地址及電話


服務中心	地址	電話
北基維修中心	台北市中山區南京東路三段14巷9號5樓	0800-087089
零組件供應中心	台北市中山區龍江路76巷16號1樓	02-25068101
桃園維修零組件中心	桃園市萬壽路三段121號2樓	0800-087089
竹苗維修零組件中心	新竹縣湖口鄉中山路一段2號	0800-087089
大台中維修零組件中心	台中市西屯區中港路三段38-3號3樓	0800-087089
彰投維修零組件中心	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	0800-087089
雲嘉維修零組件中心	嘉義縣水上鄉稻溪136-20號	0800-087089
大台南維修零組件中心	台南市南區新樂路24號	0800-087089
高雄維修零組件中心	高雄市新興區中正三路129號10樓	0800-087089
宜花東維修零組件中心	花蓮市國聯四路80號1樓	0800-087089
金門維修零組件中心	金門縣金寧鄉榕林村6-6號	08-2324334

步驟(1)

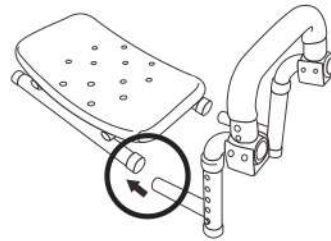


椅腳②插入椅坐①
並可調節高度(五段)

步驟(2)

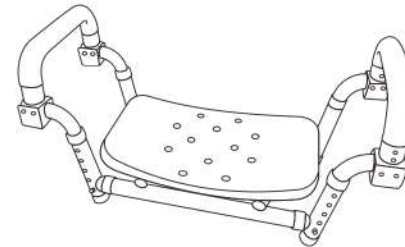


椅腳扶手2組全數插入椅
坐①的四個角管可固定

步驟(3)

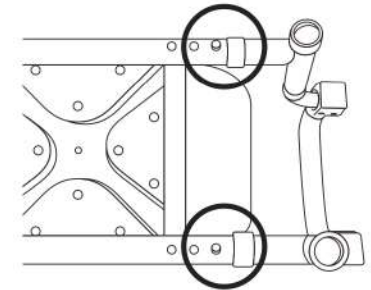


②透過兩側銅扣調整寬度

步驟(4)

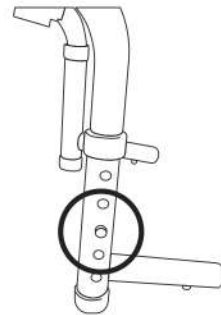

③透過椅腳銅扣調整高度

步驟(5)

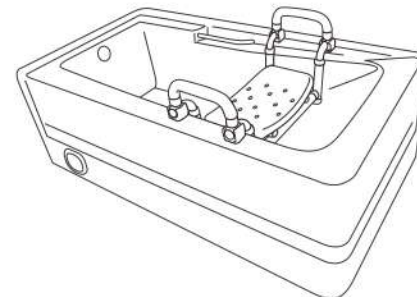

放入浴缸靠住兩側即可使用